

# All in One Light

## 使用說明書

### 重要資訊

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

### 適用於敏感性眼睛的多功能保養液

用於所有軟性隱形眼鏡，包括矽水凝膠鏡片。

### 用途

清潔、消毒、潤滑、儲存、潤濕、沖洗和去除沉積物。

請勿隨意更換眼科醫師建議使用的溶液。

為了避免出現問題並確保隱形眼鏡的配戴舒適度，每天請務必遵循下述步驟 1、2 和 3 使用。

### 步驟一 – 清潔

在進行隱形眼鏡清潔前，請先沖洗並擦乾雙手。再將鏡片置於掌心，倒下幾滴多功能保養液後，用指尖輕輕搓揉鏡片的兩面約 15 至 20 秒。

### 步驟二 – 沖洗

清潔後，用多功能保養液沖洗你的鏡片。

### 步驟三 – 消毒

打開隱形眼鏡保存盒的蓋子，依隱形眼鏡保存盒的標示，分別將左、右兩眼的隱形眼鏡放入盒中，以多功能保養液注入至標示水位，並將蓋子旋緊，讓鏡片至少浸泡四小時或過夜。

建議在長時間儲存後(即 7 天或更長時間)，先將鏡片重新消毒再配戴。

### 保存盒的保養方式

用完隱形眼鏡保存盒之後，用多功能保養液或無菌生理食鹽水徹底清洗並風乾。切勿使用肥皂或清潔劑。隱形眼鏡盒未使用時，應保持乾燥，並依眼科醫師建議定期更換。請勿以自來水清洗隱形眼鏡和隱形眼鏡盒。

### 鏡片舒適性

為提高鏡片配戴舒適度及濕潤度，在配戴隱形眼鏡前，可在鏡片的兩面滴幾滴多功能保養液。

### 注意事項

- 請勿與其他液體混合。
- 在配戴隱形眼鏡的同時，若需使用任何眼科藥物，請諮詢眼科醫生。
- 若防拆封條損壞，請勿使用。
- 萬一眼睛持續發炎，請立即停止使用，摘除隱形眼鏡，並諮詢眼科醫師。
- 丟棄開封三個月尚未用完的剩餘保養液。
- 請將所有隱形眼鏡保養液產品存放於兒童無法接觸的地方。
- 儲存隱形眼鏡時，請勿取下隱形眼鏡保存盒蓋。
- 為避免汙染，請勿讓噴嘴接觸到任何表面。
- 使用後，請旋緊瓶蓋。
- 儲存於 4°C 至 30°C 度。
- 請勿以自來水清洗隱形眼鏡和隱形眼鏡保存盒。
- 應依照眼鏡專業人員的建議定期清潔並經常更換隱形眼鏡保存盒。
- 不得重複使用保養液，以免影響眼睛健康。若鏡片浸泡於保養液中存放超過 7 天，建議按照前述步驟重新消毒。
- 若產品已超過外盒及瓶身標注之有效期限，請勿使用。
- 消毒期間，請將隱形眼鏡保存盒保持直立，並放置於安全的地方(避免兒童接觸)。

### 【生產商】

#### CooperVision Manufacturing Ltd.

Hamble Campus, South Point, Hamble, Southampton, S031 4RF, United Kingdom

### 【生產地址】

#### 1) CooperVision Manufacturing Ltd.

Hamble Campus, South Point, Hamble, Southampton, S031 4RF, United Kingdom

#### 2) CooperVision Lens Care Ltd.

Mace Industrial Estate, Mace Lane, Ashford, Kent TN24 8EP, United Kingdom

### 【香港辦事處地址】

#### CooperVision (HK) Ltd.

地址：香港九龍長沙灣道 909 號 18 樓 1805-1806 室

電話：852-37180699

傳真：852-24261177

