

幻眸彩色日拋隱形眼鏡

Ixotic 1 day Color Contact Lens

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

鏡片規格

衛部醫器製字第 **004286** 號

材質	效能/特性	近、遠視矯正	光學特性 / 規格	球面光度	+4.00 to -6.00D (0.25D steps)
	材質	Hema-copolymer			-6.50 to -12.00D (0.50D steps)
	含水量	55%			+4.50 to +8.00D (0.50D steps)
	表面特性	親水性		直徑	13.8 ~ 14.4 mm
	配戴方式	日戴型、日拋式		中心厚度	0.010 ~ 0.250 mm
外觀規格	顏色	黑色、藍色、棕色、綠色、紫色、灰色、紅色	基弧	8.0~8.8 mm	

適應症：本產品適用於無眼疾之近視及遠視患者，為矯正視力用之日戴型軟性隱形眼鏡。

禁忌症：眼角膜、結膜疾患者及乾眼症、水晶體或視網膜疾患者應在眼科醫師指示下配戴。

配戴說明：

1. 本產品作為日拋式軟性隱形眼鏡使用，每日配戴時間不得超過 12 小時，每日就寢前須取下鏡片後予以拋棄，配戴不得超過一日。
2. 初次配戴者，開始配戴時間 4 小時，隨後每日增加 2 小時。

鏡片保養須知：每日清潔保養方法：

洗淨 → 保存

1. 將鏡片凹面向上放置於手心後，將適量隱形眼鏡專用洗淨液滴入手心中。
2. 用食指指腹輕揉鏡片正反面各 15-30 秒。
3. 洗淨後使用隱形眼鏡專用保存液或生理食鹽水將鏡片沖洗乾淨。
4. 用自來水清洗隱形眼鏡保存盒後，注入新鮮之隱形眼鏡專用保存液；再將鏡片正確的放入保存盒中，並將保存盒之蓋子確實旋緊並確認。
 - 注意：清洗鏡片時，勿以畫圓圈似之方式清洗鏡片，應朝手掌內側以單一方向輕揉（正反面皆同）。
 - 注意：請勿用力按壓鏡片或拉扯鏡片。
 - 注意：隱形眼鏡需在完全去除鏡片髒污狀態下以新的保存液保存鏡片；且時常以新的保存液保持鏡片的柔軟性及光學性。
 - 注意：保存盒的保存蓋上印有 R 及 L 的英文字母，請將左右鏡片正確放入保存盒中。
 - 注意：蓋子在旋緊時，要確認鏡片是否置妥於容器中。
 - 注意：鏡片保存盒蓋須常保持清潔及更換新保存液。

→ 請使用經由衛生署核准之隱形眼鏡清潔、保養用品；且確實遵照其指示，做好鏡片之清潔工作，確保眼睛健康。

使用注意事項：

- 配戴程序及時間請確實遵守，請使用正確的洗淨及保養方法。
- 保持手部及指甲之清潔，清潔時避免指甲刮傷鏡片。
- 就寢、洗澡及游泳前，請將隱形眼鏡取出。
- 配戴時勿造成隱形眼鏡的刮傷磨痕或破損，並應避免化粧品及噴霧狀之藥物等污染隱形眼鏡。
- 當鏡片乾澀或損壞時，須更換戴用新的隱形眼鏡。
- 如有使用抗生素、利尿劑、肌肉鬆弛劑、鎮定劑、抗暈劑或其它會引起眼睛乾澀、異物感、視力模糊等情況的藥物時，可使用軟性隱形眼鏡專用眼睛滋潤劑改善情況或停止配戴隱形眼鏡，但使用任何藥物前，均應先詢問眼科醫師。
- 配戴後須定期由眼科醫師追蹤檢查，遇有眼不適症狀應即請醫師診治。
- 本器材須經眼科醫師處方使用。

製造廠/藥商名稱：昕琦科技股份有限公司

製造廠/藥商地址：新竹市東區立功里光復路二段二巷 43 號、45 號 1 樓

【香港辦事處地址】

CooperVision (HK) Ltd.

地址：香港九龍長沙灣道909號18樓1805-1806室

電話：852-37180699

傳真：852-24261177