



CooperVision®

MiSight® 1 day

每日即棄兒童近視控制隱形眼鏡

戴con指南



用洗手液洗手
並徹底沖洗



用清潔的毛巾
徹底擦乾雙手




將鏡片放在
右手食指指尖上

可參考小貼士
檢查隱形眼鏡的方向




隱形眼鏡應該是
呈碗狀向內彎曲並朝上

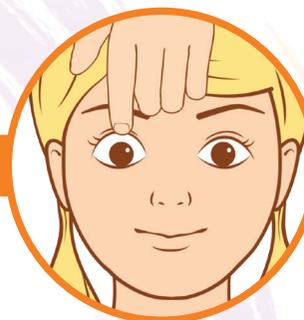

用左手的食指
把上眼瞼向上拉



用右手的中指
把下眼瞼向下拉

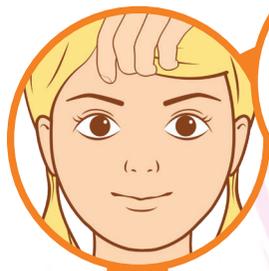

向前望
放開上眼瞼



向下望
放開下眼瞼



環顧上方
左面及右面以消除氣泡



將右手食指移開



慢慢地將隱形眼鏡
放在眼球有色的部份



眨眼數次
讓隱形眼鏡
貼合至適當的位置上


完成!



小貼士



如果方向是正確，
鏡片應該會向內捲曲

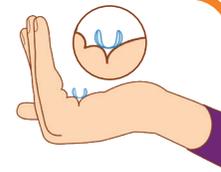

如果方向是錯誤，
鏡片的邊緣會變得平坦

