



CooperVision®

MiSight® 1 day

每日即棄兒童近視控制隱形眼鏡


除con指南




用洗手液洗手
並徹底沖洗



用清潔的毛巾
徹底擦乾雙手

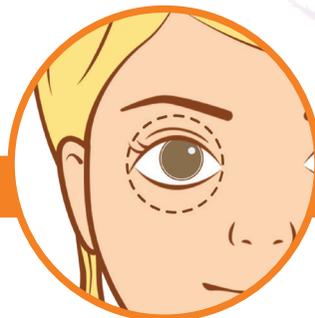


檢查隱形眼鏡
是否在眼球有色的部份上

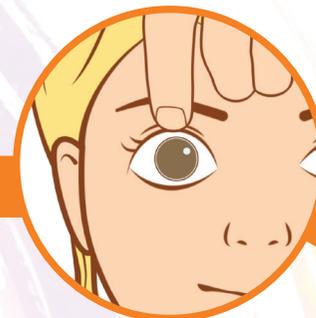

用左手食指
提起上眼瞼




將鏡片下滑到
眼睛下方眼白部分

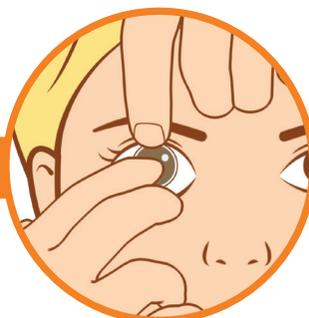


向前望慢慢地
將右手食指
放在鏡片上



低下頭，
視線微微向上望向鏡子

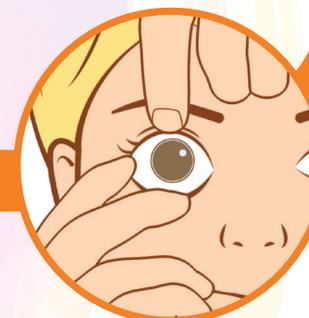

用右手中指
把下眼瞼向下拉

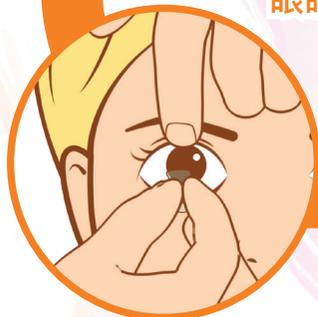

用拇指和食指
輕輕捏住隱形眼鏡



輕輕地將
隱形眼鏡從眼睛中取出



將鏡片扔進垃圾箱內

完成!