

Biomedics 1 day Extra Toric






軟性隱形眼鏡

使用說明書

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

重要資訊：

此說明書提供眼科醫師或業或患者參考，眼科醫師或業者須提供病患適當且配合患者之處方鏡片的指導手冊及資訊手冊。

符 號	處 方
	警示：本裝置由有執照的業者販售或訂購。
	請參照仿單。
	有效日期。
	批號。
	使用濕熱滅菌。

產品說明

Biomedics 1 day Extra Toric 是日戴型並為每日拋棄式鏡片，其鏡片是由親水性 2-hydroxyethyl methacrylate 和 methacrylic acid 聚合物與 ethyleneglycol dimethacrylate (45%) 和水(55%) 交叉結合製成的。這鏡片為淡藍色易於操作使用。

鏡片規格：

直 徑	12.5 mm ~ 18.0mm
中心厚度	0.025mm ~ 0.270mm (依度數決定)
基 弧	6.50mm ~ 10.8 mm
度 數	-20.00D ~ +20.00D
散光度數	-0.25D ~ -10.00D
軸 心	10° ~ 180° (每 10 度為一間隔)

鏡片的物性如下：

折 射 率	1.41
鏡片表面	親水性
含 水 量	55%
透 氧 率 (DK)	$19.6 \times 10^{-11} \text{ (cm}^2\text{/sec) (ml O}_2\text{/ml x mmHg)}$ (在攝氏 35 度以 Fatt Method)
透 光 率	97%

作用：在含水狀態，放在人的角膜上，其作用就像一個折射傳導體，使光線集中於視網膜。

適應症：近視、遠視散光矯正。

禁忌症 (不使用的理由)

患者倘若有下列情況，**不應使用** Biomedics 1 day Extra Toric：

- 眼眼前房發炎。
- 任何眼睛疾病，外傷，或影響角膜，結膜，或眼瞼的異常。
- 眼睛微生物感染。
- 淚液不足。
- 角膜感覺遲鈍。
- 眼疾再復發，眼瞼感染或曾因配戴隱形眼鏡所引起不良作用或不能忍受配戴或眼部正常反應之病史者。
- 不能依照隱形眼鏡配戴程序及保養程序者。
- 因為年齡，體弱，生、心理狀況，副作用或工作生活環境不能依照或不願意遵循配戴程序或保養程序者。
- 對於保養隱形眼鏡必需使用的溶液中的成份，如硫柳汞或汞，過敏。
- 僅供視力矯正者使用，若不要或不能遵循隱形眼鏡配戴與保養程序之要求者不應提供配戴。

警告：

診斷數據超過如下特徵狀況的病患不參予配戴隱形眼鏡：

- Rose Bengal 染色 > 12/18 等級
- Fluorescein 染色 > 12/15 等級
- 睑板腺機能障礙 > 8/0 - 4 等級

應向病患提出下列的警告：

- **有問題的隱形眼鏡和隱形眼鏡保養產品可能導致眼睛嚴重的傷害。**病患必需遵循眼睛照護業者的指示以及標籤說明書以正確使用隱形眼鏡及隱形眼鏡保養產品，包括隱形眼鏡盒。眼睛的問題，包括角膜潰瘍，可能迅速惡化並導致失明。日戴型鏡片，不可戴著過夜，應該指示患者睡覺時不可配戴。臨床研究已經顯示，戴著鏡片過夜會增加負面反應的嚴重性。研究顯示吸煙的人配戴隱形眼鏡比不吸煙的人更可能發生副作用。如果患者感到眼睛不舒服，眼淚過量，視力改變，眼睛發紅或其他問題，應該立刻如指示的拿下鏡片，並立即聯絡眼科醫師。

注意事項：

- 隱形眼鏡配戴者可能不適合某些特定職業，需要有保護眼睛之器具。
- 必須避免濃煙、灰塵與蒸汽或多風的環境。
- 不可用唾液或專用溶液之外的液體潤濕隱形眼鏡。
- 化妝品、化妝水、肥皂、乳霜、除臭劑、或噴劑避免跑進眼睛或沾到鏡片，可能造成鏡片或眼睛損害。
- 鏡片污染可能造成眼睛感染或灌洗液造成眼睛損傷。
- 勿用鑷子或其它工具從隱形眼鏡容器中取出隱形眼鏡。將隱形眼鏡倒至手中。
- 應教導及示範配戴者可以俐落的取下隱形眼鏡。
- Fluorescein 不應使用於戴上隱形眼鏡的眼睛。隱形眼鏡會吸收此染料而使其變色。Fluorescein 要使用於眼睛時，應以眼用無菌生理食鹽水清洗。必須等 1 小時後才可以在配戴新鏡片，此新鏡片必需在潤濕清洗後使用。
- 遵循 Biomedics 1 day Extra toric soft contact lenses 病患說明書以及眼睛保健開業人員所指示關於處理，戴上，取下，清潔，消毒，貯存和配戴的說明。
- 服用口服避孕者可能改變視力，當配戴隱形眼鏡時須改變配戴時間。
- 當鏡片有破損時，若需使用藥物時，應先諮詢眼科醫師。
- 有些藥物：如抗組織胺，解除充血劑，利尿劑，肌肉鬆弛劑，鎮靜劑及鎮痛劑可能造成眼睛乾澀，引起視力模糊。這些症狀可以諮詢醫師使用正確藥物或暫時停止配戴鏡片。
- 處理鏡片之前一定要洗手，勿讓化妝品、化妝水、肥皂、乳霜、除臭劑、或噴劑跑進眼睛或沾到鏡片，油性化妝品比水性化妝品更有可能損害鏡片。
- 如果隱形眼鏡含外來材料，請勿用手或手指碰觸，因為可能造成細微的刮痕，導致視覺偏差，或傷及眼睛。
- 配戴隱形眼鏡時避開有傷害性或刺激性蒸氣和煙霧。
- 向眼睛保健開業人員詢問關於體育活動時隱形眼鏡的配戴。
- 告知醫師 (保健開業人員) 有配戴隱形眼鏡。
- 通知雇主有配戴隱形眼鏡。有些工作可能需要使用眼睛保護裝置或要求病患不可配戴隱形眼鏡。
- 無論何種隱形眼鏡，皆需要追蹤以確保健康。應指示病患適當的追蹤時程。

副作用：

應告知可能會發生下列問題：

- 眼睛疼痛。
- 有灼燒感、刺痛或癢。
- 可能比第一次戴上鏡片時更不舒服。
- 可能感覺眼睛裏有東西 (外物、劃傷的部位)。
- 淚水過多。
- 不正常的眼睛分泌物。
- 眼睛發紅。
- 視力不佳。
- 視力不良，物體周圍出現光暈或畏光。
- 光敏感度改變。
- 感覺到眼睛乾燥。

如有上述徵狀出現應依下列指示：

- 立刻拿掉鏡片
- 如果不舒服或問題停止，應仔細檢查鏡片。
- 如果鏡片太髒，或有外來物或問題停止時，應清潔與潤濕鏡片，或將鏡片丟棄換

上新鏡片。

- 如果鏡片有任何損害，請立即將鏡片丟棄。
- 重新戴上新的鏡片後，如果問題繼續存在，患者就不應該再戴回鏡片，而應該立刻聯絡其眼睛照護業者或醫生。若發生任何前述之症狀，患者必須被告知可能的嚴重狀況，像是感染、角膜潰瘍、角膜的新生血管化，或可能出現虹膜炎。患者應該接受指導，把鏡片拿下，並立刻尋求專業人員鑑定問題，並且立刻治療，以避免眼睛嚴重受損。

乾燥鏡片的保養

軟性隱形眼鏡離開眼睛以後，曝露在空氣中，其表面會變乾且逐漸失去水份，倘若發生此種情形，應將鏡片丟棄，使用新鏡片。

沾黏鏡片的保養

如果鏡片黏在眼球上（或不再移動），應該指示患者直接滴幾滴推薦使用的潤滑劑，或隱形眼鏡護理液到眼睛裏，等到鏡片能夠在眼睛裏自由移動。如果幾分鐘以後鏡片仍然沒有移動，患者應該立刻諮詢其眼睛照護業者。

如何供應：

Biomedics 1 day Extra Toric 是裝在附有食鹽緩衝液的錫箔密封包裝中，並於滅菌後供應，每一包裝外都註明鏡片的基弧、直徑、屈光度數、製造批號及到期日。

如果包裝已經破損，請勿使用。

【生產商】

CooperVision, Inc.
711 North Road,
Scottsville, New York 14546, USA

【生產位址】

- 1) CooperVision, Inc.
711 North Road,
Scottsville, New York 14546, USA
- 2) CooperVision Manufacturing Ltd.
South Point, Hamble,
Southampton, SO31 4RF, United Kingdom
- 3) CooperVision Caribbean
500 Road 584, Lot 7,
Amuelas Industrial Park,
Juana Diaz, 00795 Puerto Rico, USA

【香港境內售後服務機構】

CooperVision (HK) Ltd.
地址：香港新界葵芳興芳路 223 號新都會廣場一期 43 樓 4309-12 室
電話：852-37180699
傳真：852-24261177